

Tarefa: Lavagem e desinfecção de almotolia**Executante:** Técnico de enfermagem**Frequência:** Mensal**Revisão:**

Nº 04 18/01/2021

Análise Crítica:

Data:

Assinatura:

Aprovado:

Data:

Assinatura:

Resultado Esperado:

Processamento adequado de almotolias

Recursos Necessários:

1. Recipiente de plástico;
2. Esponja macia;
3. Detergente enzimático ou detergente neutro;
4. Compressas limpas;
5. Escova de nylon para lavagem de tubos;
6. Solução Desinfetante (glutaraldeído ou ácido peracético);
7. E.P.I (avental impermeável, luvas de cano longo, luva de procedimento, máscara N 95 e óculos de proteção).

Atividades:

1. Higienizar as mãos;
2. Paramentar-se com os EPI'S (usar luva nitrílica de cano longo);
3. Desprezar o conteúdo das almotolias na pia;
4. Retirar os rótulos;
5. Lavar as almotolias em água corrente com o auxílio da esponja e retirar do excesso de conteúdo;
6. Diluir o detergente enzimático ou neutro de acordo com as recomendações do fabricante;
7. Imergir as almotolias e as tampas dos recipientes plásticos, deixando-os totalmente imersos na solução;
8. Deixar agir de acordo com as recomendações do fabricante;
9. Retirar as almotolias e as tampas dos recipientes;
10. Lavar em água corrente, individualmente com auxílio de escova;
11. Deixar as almotolias e tampas com abertura para baixo, sobre uma compressa limpa, até secagem completa;
12. Encaminhá-las para desinfecção por trinta minutos;
13. Retirar as almotolias e tampas e lavar em abundância;
14. Encaminhar para a secagem;
15. Retirar as luvas e higienizar as mãos;
16. Calçar luvas de procedimento;
17. Secar com o auxílio de compressa limpa ou com ar sob pressão;
18. Guardar após a secagem, em saco plástico transparente;
19. Retirar as luvas e higienizar as mãos;
20. Encaminhar para os setores.

Referências Bibliográficas: Referências Bibliográficas:

-Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Kazuko Uchikawa Graziano, Arlete Silva e Eliane Molina Psaltikidis. Barueri, SP: Manole, 2011; -Práticas Recomendadas SOBECC, 5ª edição, 2009.

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem

Carimbo e assinatura: