

Tarefa: Limpeza da autoclave**Executante:** Técnico de enfermagem.**Frequência:** Semanalmente

Revisão:

Nº 04 18/01/2021

Análise Crítica:

Data:

Assinatura:

Aprovado:

Data:

Assinatura:

Resultado Esperado:

Manter o bom desempenho e conservação do equipamento

Recursos Necessários:

1. Compressas
2. Água
3. Máscara descartável;
4. Luva de procedimento.

Atividades:

1. Higienizar as mãos;
2. Colocar a máscara;
3. Calçar as luvas de procedimento;
4. Fazer a limpeza da câmara com compressas umedecidas com água;
5. Enxugar com compressas secas;
6. Recolher material;
7. Deixar ambiente limpo e organizado.
8. Retirar as luvas;
9. Higienizar as mãos.

Cuidados Especiais: · A limpeza só poderá acontecer se as autoclaves estiverem totalmente frias.
· Limpeza das autoclaves será realizada semanalmente antes da primeira carga do dia, após a última carga do dia e após a manutenção do equipamento.

Referências Bibliográficas: Manual de qualificação de esterilização de autoclaves. Comissão de Controle de Infecção- SMS-RP. 2009

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem

Carimbo e assinatura: