

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CME 05 Página 1/1 Emissão: 06/07/2015
Tarefa: Limpeza e desinfecção das lâminas de laringoscópio. Executante: Técnico de enfermagem Frequência: Mensal		Revisão: Nº 04 18/01/2021
Análise Crítica: Data: Assinatura:	Aprovado: Data: Assinatura:	

Resultado Esperado:

Fornecer materiais limpos e isentos de contaminação impedindo a cadeia de transmissão de infecção.

Recursos Necessários:

1. EPI (luvas de procedimento, óculos de proteção, máscara N95, avental impermeável e gorro/touca.);
2. Solução enzimática;
3. Solução desinfetante (glutaraldeído ou ácido peracético);
4. Compressas estéreis;
5. Escovas de cerdas macias;
6. Água potável.

Atividades:

1. Higienizar as mãos;
2. Colocar a máscara;
3. Calçar as luvas;
4. Colocar as lâminas completamente imersas em solução enzimática por 5 minutos;
5. Lavar com escova observando atenciosamente a ponta e o local da lâmpada;
6. Enxaguar em água corrente;
7. Enxugar com compressa estéril;
8. Mergulhar em solução desinfetante deixando totalmente imerso por 10 minutos;
9. Enxaguar abundantemente em água corrente;
10. Enxugar com compressa estéril;
11. Passar para a área de preparo;
12. Desprezar o material usado segundo PGRSS;
13. Retirar as luvas;
14. Higienizar as mãos.

Cuidados Especiais:

- Observar semanalmente a saturação da solução;
- A solução enzimática deverá ser trocada diariamente e sempre que apresentar turvação;
- Certificar-se da concentração da solução do ácido peracético.

Referências Bibliográficas: Práticas Recomendadas SOBECC, 5ª edição, 2009.

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem

Carimbo e assinatura:

