

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CME 04 Página 1/1 Emissão: 06/07/2015
Tarefa: Limpeza e desinfecção de ambu. Executante: Técnico de enfermagem Frequência: A cada seis meses ou quando necessário		Revisão: Nº 04 18/01/2021
Análise Crítica: Data: Assinatura:	Aprovado: Data: Assinatura:	
Resultado Esperado: Utilização de ambus limpos e com desinfecção realizada		
Recursos Necessários: 1. Ambu; 2. Glutaraldeído; 3. Esponja macia; 4. Detergente, compressa limpa; 5. EPI (luvas de cano longo e de procedimento, óculos de proteção, máscara N95, avental impermeável); 6. Água potável; 7. Compressa macia.		
Atividades: 1. Higienizar as mãos; 2. Colocar os EPI's; 3. Desconectar as peças do ambu; 4. Imergir o ambu em detergente enzimático de acordo com o tempo orientado pelo fabricante; 5. Enxaguar com água em abundância; 6. Deixar escorrer o excesso da água dos componentes e imergi-los na solução desinfetante durante 30 minutos; 7. Retirar os componentes da solução e enxaguar com água em abundância; 8. Encaminhá-los para a área de secagem; 9. Retirar as luvas de cano longo e higienizar as mãos; 10. Calçar as luvas de procedimento; 11. Realizar secagem com pano macio e/ou ar sob pressão; 12. Acondicionar em recipiente em sacos plásticos e identificar a data da desinfecção; 13. Retirar os EPI's e higienizar as mãos; 14. Encaminhar para o setor.		
Cuidados Especiais: · Testar o funcionamento do ambu após a desinfecção; · Comunicar imediatamente ao enfermeiro a necessidade de reparos e substituição de materiais danificados. · Na presença da bolsa ventilatória, limpar a parte externa da bolsa ventilatória com auxílio de compressa limpa e detergente enzimático, evitando a entrada de água no interior da bolsa.		
Referências Bibliográficas: Práticas Recomendadas SOBECC, 5ª edição, 2009.		

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem
Carimbo e assinatura: