



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ENDOSCÓPIOS

Página 1/2

Emissão: 03/09/2015

Tarefa: Limpeza e Desinfecção de Endoscópios

Executante: Enfermeiro e Técnico de enfermagem

Frequência: A cada exame

Revisão:

Nº 04 18/01/2021

Análise Crítica:

Data:

Assinatura:

Aprovado:

Data:

Assinatura:

Resultado Esperado: Desinfecção de endoscópios para prevenção de infecção.

Recursos Necessários:

1. EPI's (luvas de cano longo e de procedimento, máscara N95, óculos de proteção, avental impermeável e protetor auricular);
2. Esponja macia;
3. Escovas macias;
4. Detergente enzimático;
5. Solução Desinfetante (Glutaraldeído - Galão);
6. Fita teste;
7. Almotolia com álcool a 70%;
8. Almotolia com álcool gel;
9. Compressas limpas;
10. Lençol;
11. Pistolas pressurizadas;
12. Lavadoras Ultrassônicas;
13. Cera para lente do aparelho;
14. Lubrificante para as válvulas do aparelho;
15. Endoscópios.

Atividades:

1. Lavar as mãos;
2. Paramentar-se com os EPI's;
3. Lavar o endoscópio na cuba usando água e detergente enzimático;
4. Remover as válvulas e escová-las com escova apropriada;
5. Lavar toda a parte externa do endoscópio com esponja macia e detergente enzimático;
6. Injetar detergente enzimático nos canais;
7. Introduzir a escova de limpeza nos canais do aparelho (canal de biópsia e aspiração) e tracioná-la quantas vezes for necessário até que a escova de limpeza saia limpa na porção distal do tubo;
8. Enxaguar com água corrente e injetar água nos canais com a pistola de água;
9. O endoscópio e seus componentes são colocados na lavadora ultrassônica e todos os

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem

Carimbo e assinatura:



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

**LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DE ENDOSCÓPIOS**

Página 2/2

Emissão: 03/09/2015

Tarefa: Limpeza e Desinfecção de Endoscópios

Executante: Enfermeiro e Técnico de enfermagem

Frequência: A cada exame

Revisão:

Nº 04 18/01/2021

Análise Crítica:

Data:

Assinatura:

Aprovado:

Data:

Assinatura:

conectores dos canais são ligados segundo o manual de instruções dos mesmos;

10. Ao término do processo de desinfecção deve-se retirar o aparelho e seus componentes da lavadora ultrassônica e iniciar a secagem dos mesmos usando uma compressa e a pistola de ar comprimido;
11. Armazenar os endoscópios sem tracionar o tubo em armário próprio, ventilado, de fácil limpeza, em temperatura ambiente e sem umidade;
12. Lavar os acessórios de limpeza com detergente enzimático deixando-os imersos por 30 minutos;
13. Passar compressa com álcool nos carrinhos de transporte dos endoscópios, nas lavadoras e nos demais componentes da sala de lavagem e desinfecção;
14. Organizar a sala;
15. Retirar os EPI's e higienizar as mãos.

Cuidados Especiais: Comunicar a enfermeira a necessidade de substituir ou solicitar reparos dos materiais danificados ou que apresentem resultados duvidosos.

Referências Bibliográficas: Manual de Limpeza e Desinfecção de Aparelhos Endoscópicos - SOBEEG

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem

Carimbo e assinatura: