

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	CME 01 Página 1/1 Emissão: 06/07/2015
Tarefa: Limpeza e Desinfecção de Umidificadores Executante: Técnico de enfermagem Frequência: Diária		Revisão: Nº 04 18/01/2021
Análise Crítica: Data: Assinatura:	Aprovado: Data: Assinatura:	

Resultado Esperado:

Umidificadores limpos e com prática de desinfecção segura

Recursos Necessários:

1. Esponja macia;
2. Escova macia;
3. Detergente enzimático;
4. Compressas limpas;
5. EPI's (luvas de cano longo e de procedimento, máscara N95, óculos de proteção, avental impermeável);
6. Solução desinfetante (glutaraldeído ou ácido peracético)

Atividades:

1. Paramentar-se com os EPI's;
2. Desmontar o umidificador, despejando a água na pia;
3. Imergir os componentes na solução de detergente enzimático;
4. Lavar os componentes com auxílio de escova e esponja;
5. Enxaguar os componentes com água em abundância;
6. Deixar secar em pano limpo;
7. Imergir totalmente os componentes de plástico secos na solução desinfetante;
8. Deixar agir por 30 minutos;
9. Retirar os componentes de plástico da solução e lavar com água em abundância;
10. Encaminhar para a área de secagem;
11. Retirar as luvas de cano longo;
12. Higienizar as mãos e calçar as luvas de procedimentos;
13. Deixar secar sobre uma compressa limpa;
14. Guardar em sacos plásticos após secagem. Identificando com a data da desinfecção;
15. Retirar EPI's e higienizar as mãos;
16. Encaminhar para as unidades.

Cuidados Especiais: Comunicar ao enfermeiro a necessidade de substituir ou solicitar reparos dos materiais danificados ou que apresentem resultados duvidosos.

Referências Bibliográficas: Práticas Recomendadas SOBECC, 5ª edição, 2009.

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem

Carimbo e assinatura: